

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDCTB-H rev. 00

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscaras

Nome Comercial: Máscara Descartável Cirúrgica com Tiras - BASICS* Halyard

Modelo e Especificações Técnicas:

47251 Máscara Descartável Cirúrgica com Tiras - BASICS* Azul

47252 Máscara Descartável Cirúrgica com Tiras - BASICS* Branca

BFE \geq 98%

$\Delta P < 40$ Pa / cm²

Limpeza microbiana \leq 30 ufc / g

Registro Anvisa: 81832580057

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 05 anos


Embalagem em forma de Dispenser

Produto de Pronto Uso.

Fotos



	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDCTB-H rev. 00

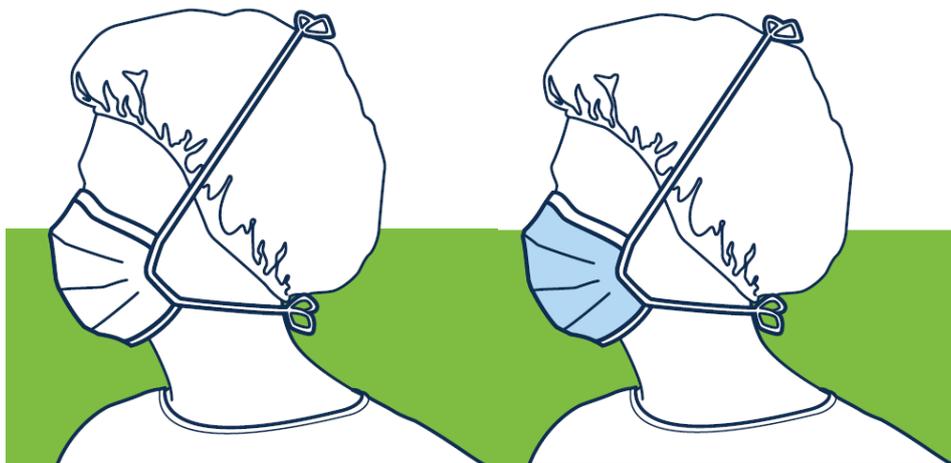

Conteúdo

São embaladas 50 unidades de máscaras em um dispenser de papel cartonado e então são acondicionadas em caixa de papelão para transporte contendo 300 unidades (6 dispensers).

Descrição e Indicação

As Máscaras Descartáveis Cirúrgicas Halyard são indicadas para uso por profissionais de saúde e/ou pacientes em diferentes ambientes de cuidados, com a finalidade de proteção facial básica.

Possuem tiras para facilitar o ajuste no rosto.

Instruções de Uso

- Retire a máscara da caixa.
- Colocar a máscara com as mãos limpas.
- Sobreponha a máscara sobre a face.
- Molde o aro maleável. Ajustar ao perfil do rosto do usuário.
- Amarrar atrás da cabeça de forma que fique confortável, porém, não frouxo.
- Molde novamente o aro maleável para que ele se ajuste perfeitamente ao rosto.
- Posicione a máscara no rosto de maneira que a parte colorida fique voltada para a área exterior.
- Descartar após o uso.

OBS: A máscara facial deve ser usada com o lado colorido para fora.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDCTB-H rev. 00

Composição

Spunbond, branco ou azul

Meltblown

Spunbond

Cabo de aço

Fita de poliuretano ou spunbond

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta. Manter em sua embalagem original.

Condições para o Transporte

O produto deve ser transportado em local limpo, sem poeira, fresco, seco e longe de luz fluorescente ou ultravioleta.

Condições de Manipulação

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e normas ambientais locais.

Advertências

- Proibido Reprocessar
- Não deve ser usado quando for necessário resistência adicional ao fluido ou alto desempenho de filtração;
- Nenhuma máscara elimina completamente o risco de contaminação por sangue ou fluidos corporais.

Precauções

- Não deixe a máscara pendurada no pescoço;
- Não guarde a máscara usada no bolso;
- Evitar tocar na máscara desnecessariamente durante o seu uso;
- Deve ser usada por um único indivíduo;
- Avaliar a utilização do produto caso o pacote esteja aberto, violado ou danificado

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: Set/20
	Instrução de Uso	IUMDCTB-H rev. 00

Contraindicações:

Não aplicável.

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 04208-001.

CNPJ: 27.242.576/0001-11.

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294.

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 01539-010 -

CNPJ: 00.142.576/0001-86

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjajian – CRF-SP: 84.729

Fabricante Responsável: O&M Halyard, Inc

9120 Lockwood Blvd - Mechanicsville, Virgínia - USA 23116